

PHILIPS

HearLink

Chargeur

miniRITE T R



Guide d'utilisation

Certificat de garantie

Nom du propriétaire:

Audioprothésiste:

Adresse de l'audioprothésiste:

Numéro de téléphone de l'audioprothésiste:

Date d'achat:

Période de garantie:

Mois:

Modèle :

N° de série:

Garantie internationale

Votre chargeur est couvert par une garantie internationale limitée émise par le fabricant pour une période de 24 mois à compter de la date de livraison. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de matériel de l'appareil lui-même, mais pas les accessoires tels que les piles, câbles, blocs d'alimentation, etc. Les problèmes résultant d'une manipulation ou d'un entretien inadéquat / incorrect, d'une utilisation excessive, d'accidents, de réparations effectuées par une personne non autorisée, de l'exposition à des conditions corrosives, de dommages dus à la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil ou des réglages incorrects NE SONT PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui dépasse les clauses de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

N'hésitez pas à apporter votre chargeur à votre audioprothésiste. Il pourra peut-être résoudre immédiatement les problèmes mineurs et les réglages.

Introduction

Ce livret vous explique comment utiliser et entretenir votre chargeur. Nous vous invitons à le lire attentivement, y compris la section Avertissements. Cela vous aidera à utiliser au mieux votre nouveau chargeur. Si vous avez des questions supplémentaires sur le chargeur, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Utilisation prévue

Utilisation prévue

Le chargeur est conçu pour recharger les aides auditives pourvues de batteries rechargeables.

Le produit est destiné à être utilisé avec une solution auditive donnée.

Indications

Il n'existe aucune indication pour le chargeur à proprement parler.

Utilisateur concerné

Adultes et enfants de plus de 36 mois.

Environnement d'utilisation

Domicile.

Contre-indications

Aucune contre-indication.

Avantages cliniques

Voir les avantages cliniques de l'aide auditive.

Remarque importante

Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre aide auditive pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre solution d'aide auditive spécifique.

Sommaire

<u>Contenu de la boîte</u>	9
<u>Conditions de température</u>	11
<u>Temps de charge</u>	14
<u>Prendre soin de votre chargeur</u>	16
<u>Alimenter le chargeur via d'autres sources</u>	17
<u>Avertissements généraux</u>	18
<u>Guide de dépannage</u>	20
<u>Conditions d'utilisation</u>	22

Contenu de la boîte

La boîte du chargeur des aides auditives miniRITE T R contient les accessoires suivants :




Chargeur



Prise secteur




Pochette de voyage

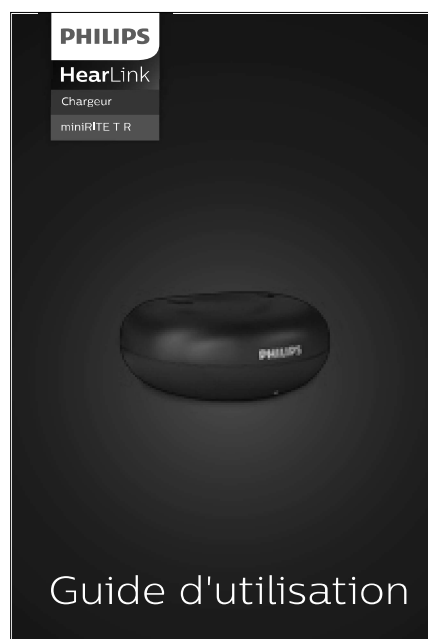

Guide d'utilisation

Guide d'utilisation

Description du chargeur

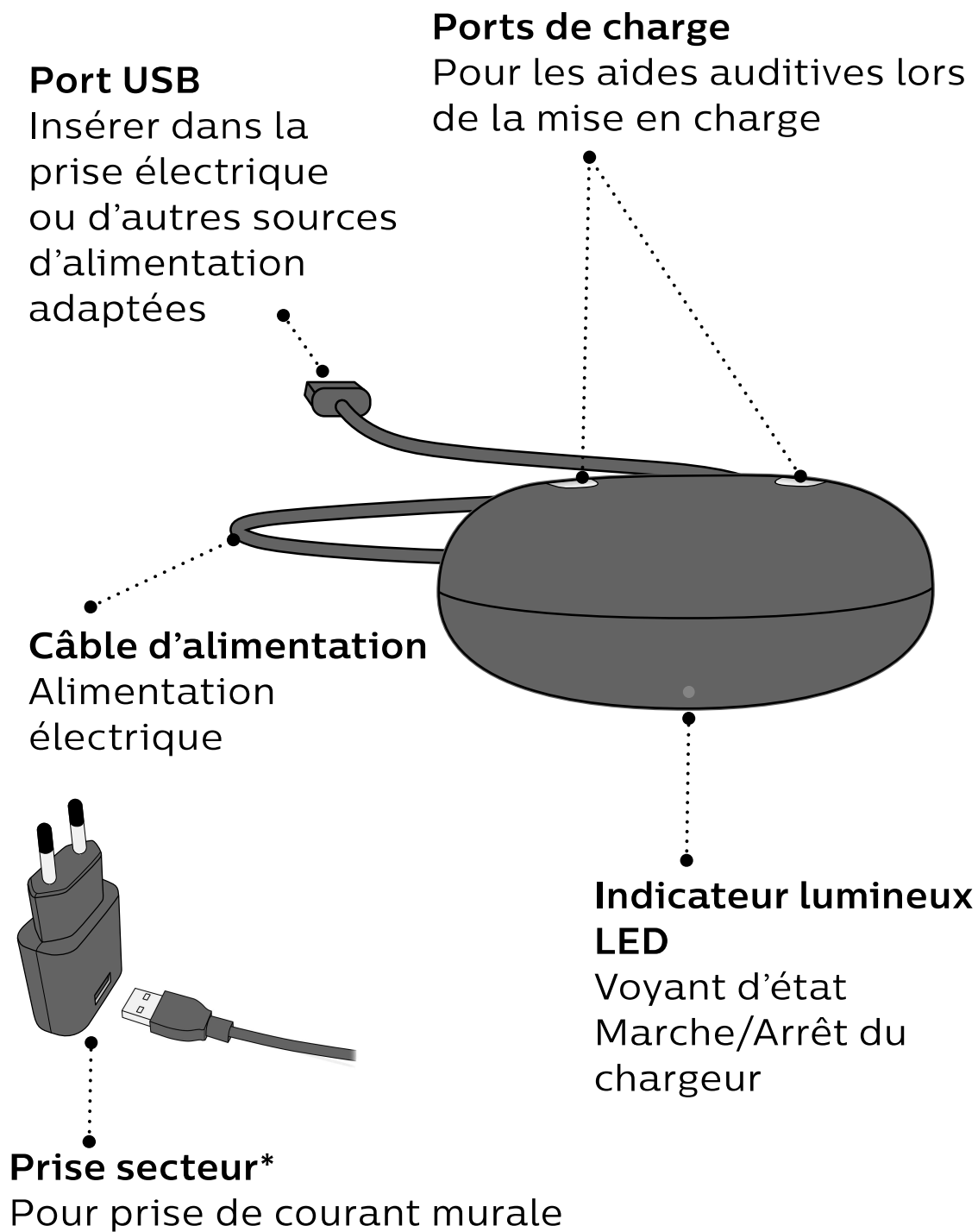

* La fiche secteur varie selon les pays


Conditions de température

Température	Conditions de charge
Inférieure à 5°C	Pas de charge en raison d'une température trop faible
Entre 5 et 35°C	Condition optimale de charge. La charge peut nécessiter jusqu'à 3 heures.
Entre 5 et 10°C, et entre 35 et 40°C	Charge prolongée. La charge peut nécessiter jusqu'à 4 heures.
Supérieure à 40°C	Pas de charge en raison de la température trop élevée

La charge reprend automatiquement lorsque la température se situe dans la plage de fonctionnement de 5°C à 40°C .


Préparer le chargeur

Se connecter à une source d'alimentation

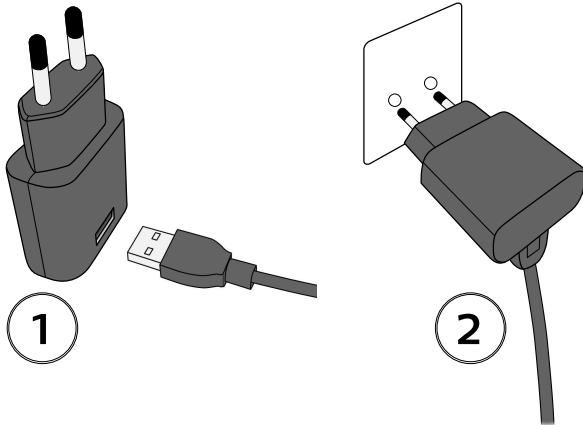

1. Insérez le connecteur USB dans la fiche secteur.
2. Insérez la fiche secteur dans une prise de courant électrique murale. Le chargeur s'allume automatiquement.


Le chargeur est allumé

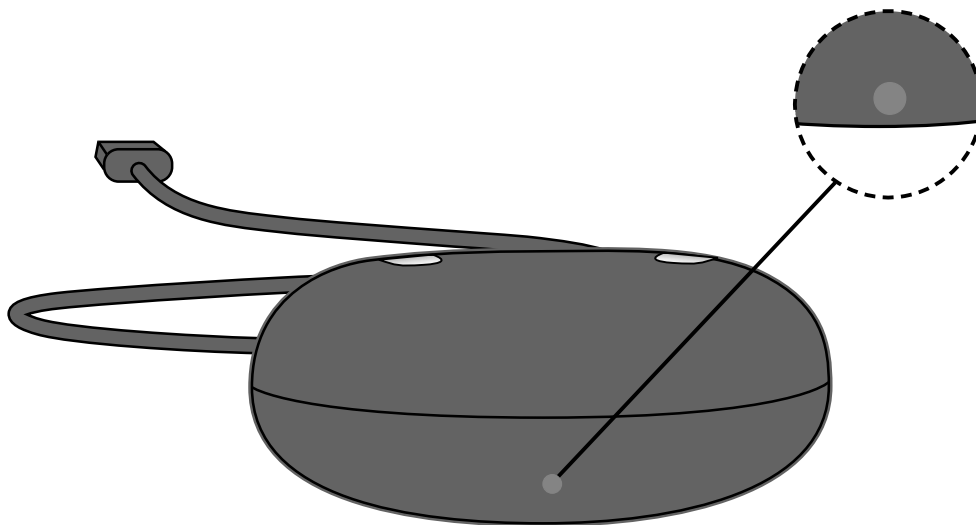

Lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation, le voyant lumineux LED devient vert.


Recharger les aides auditives

Placer les aides auditives dans le chargeur

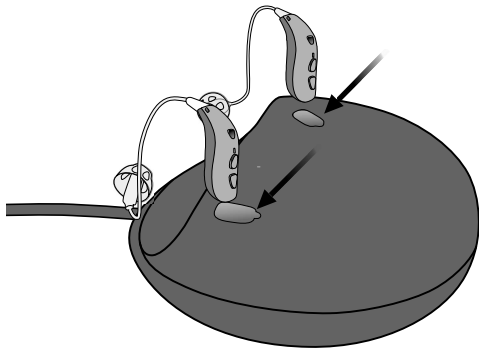

Placez les aides auditives dans les ports de charge comme indiqué sur l'image.

Mise en charge

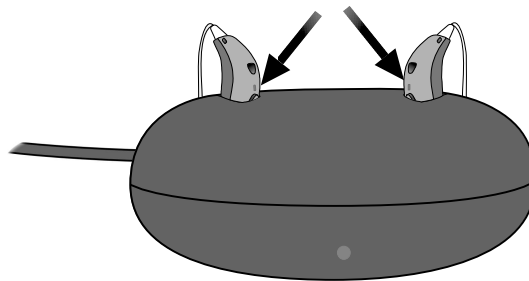

Les voyant lumineux LED des aides auditives s'allument lorsque les aides auditives sont placées correctement dans le chargeur.

Voyants d'état de charge de l'aide auditive :

Voyant rouge/orange
= Charge en cours

Voyant vert = Charge complète

Remarque important

Lorsque vous rechargez l'aide auditive, utilisez l'alimentation électrique 5,0 V/1 A fournie initialement avec le chargeur et qui porte le marquage de sécurité CE.



Temps de charge

Chargez complètement votre aide auditive avant la première utilisation.

Mettez votre aide auditive en charge toutes les nuits. Cela vous permet de commencer votre journée avec une aide auditive complètement chargée.

Le temps de charge dépend de la capacité restante de la batterie. Si votre aide auditive est complètement déchargée, la durée de charge normale est de :

3 heures = Charge complète

1 heure = 50% de charge

30 minutes = 25% de charge

Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque la batterie est complètement rechargée. Laissez l'aide auditive dans le chargeur lorsque vous ne la portez pas. N'oubliez pas de laisser le chargeur branché à une source d'alimentation.

Notez que le temps de charge est susceptible de varier entre l'aide auditive gauche et droite.

Remarque importante

Laissez toujours le chargeur connecté à une source d'alimentation lorsque l'aide auditive est installée dans le port de charge. Débrancher le chargeur met en marche l'aide auditive qui commencera alors à utiliser la batterie.

Prendre soin de votre chargeur

Assurez-vous toujours que le chargeur est sec et propre avant de l'utiliser. Nettoyez régulièrement les ports de charge en utilisant un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau ou de produits d'entretien pour les nettoyer.

Gardez votre chargeur dans un endroit sec, par exemple dans une chambre, plutôt que dans la salle de bain ou la cuisine.

Maintenez le chargeur dans une pièce où la température se situe entre 5°C et 40°C.

Alimenter le chargeur via d'autres sources

Il est possible d'alimenter le chargeur à partir d'autres sources avec un port USB. Assurez-vous que la source d'alimentation est compatible USB 2.0, sortie minimale de 500 mA.

Exemples de sources

- Batterie externe
- Ordinateur
- Voiture

Vérifiez toujours que la charge commence afin de vous assurer que la source d'alimentation fournit suffisamment de courant au chargeur. Vérifiez que le voyant lumineux LED du chargeur devient vert (voir page 10) et que celui de l'aide auditive devient rouge (voyant rouge/orange=charge en cours) (voir page 13).

⚠ Avertissements généraux

Vous devez vous familiariser pleinement avec les avertissements suivants avant d'utiliser votre chargeur, tant pour votre sécurité personnelle que pour vous assurer de son utilisation correcte.

Consultez votre audioprothésiste si vous rencontrez des opérations ou événements inattendus avec votre chargeur.

Utilisation du chargeur

- Le chargeur doit être uniquement utilisé comme indiqué.

Risque de brûlures

- Ne placez rien d'autre que les aides auditives dans les ports de charge.

Risques d'étouffement

- Le chargeur, l'aide auditive et leurs composants doivent être conservés hors de la portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler ces objets ou de se blesser.

En cas d'ingestion d'une petite pièce, consultez un médecin ou rendez-vous dans un hôpital immédiatement.

Chaleur

- Le chargeur ne doit jamais être exposé à une chaleur extrême, par exemple dans une voiture garée au soleil.
- Le chargeur ne doit pas être séché dans un four à micro-ondes ou tout autre type de four.

Connexion à un équipement externe

- La sécurité du chargeur, lorsqu'il est connecté à un équipement externe (via un câble d'entrée auxiliaire, un câble USB, ou directement), est déterminée par l'équipement externe. Lorsque l'aide auditive est connectée à un équipement externe branché sur une prise murale, cet équipement doit être conforme à la norme IEC-62368 (ou IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019) ou à des normes de sécurité équivalentes.

Risques d'incendie

- La source d'alimentation de votre chargeur ne contient pas suffisamment d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions d'utilisation normales.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles
La LED du chargeur reste éteinte lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation	Le chargeur n'est pas branché
La LED du chargeur émet de longs clignotements rouge/orange	L'aide auditive ou le chargeur sont trop chauds
La LED du chargeur émet répétitivement 3 brefs clignotements rouge/orange	Le chargeur est trop froid Erreur du système
La LED de l'aide auditive reste éteinte lorsque l'aide auditive est placée dans le chargeur	Le chargeur n'est pas branché
	L'aide auditive ou le chargeur sont trop chauds ou trop froids
	La charge est incomplète. La température de la pièce est supérieure à 35 °C, ce qui prolonge le temps de charge. Le chargeur a arrêté le processus de charge pour protéger la batterie.
La LED de l'aide auditive clignote en rouge/orange lorsque l'aide auditive est placée dans le chargeur	L'aide auditive n'est pas insérée correctement dans le chargeur
	Erreur du système

Solutions

Vérifiez que l'alimentation électrique est connectée correctement.

Assurez-vous que la source d'alimentation est conforme aux spécifications indiquées sur la page 17.

Déplacez l'aide auditive et le chargeur à un endroit où la température se situe entre +5°C et +40°C (+41 °F et +104 °F)

Déplacez l'aide auditive et le chargeur à un endroit où la température se situe entre 5°C et 40°C

Contactez votre audioprothésiste

Vérifiez que l'alimentation électrique du chargeur est connectée correctement

Déplacez l'aide auditive et le chargeur à un endroit où la température se situe entre 5°C et 40°C

Réinsérez l'aide auditive dans le chargeur pour compléter la charge en 15 minutes environ.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'impuretés dans les ports de charge

Contactez votre audioprothésiste

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

Température:
+5°C à +40°C
Humidité relative: 15% à 93%, sans condensation
Pression atmosphérique :
700 hPa à 1060 hPa

Conditions de stockage et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant de longues périodes lors du transport et du stockage :

Stockage

Température :
-25°C à +70°C
Humidité relative: 15% à 93%, sans condensation

Transport

Température :
-25°C à +70°C
Humidité relative: 15% à 93%, sans condensation

Pour en savoir plus sur les conditions d'utilisation de l'aide auditive, consultez le Guide d'utilisation de l'aide auditive.

Remarques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....





.....

.....

.....

Description des symboles utilisés dans ce livret ou sur l'étiquette du conditionnement

	<p>Avertissements Le texte marqué d'un symbole de marquage doit être lu avant d'utiliser le produit.</p>
	<p>Fabricant Le produit est élaboré par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.</p>
	<p>Déchets électroniques (DEEE) Recyclez vos aides auditives, accessoires, batteries et piles conformément aux réglementations locales ou renvoyez-les à votre audioprothésiste en vue de leur mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la Directive 2012/19/UE sur les déchets et les équipements électriques (DEEE).</p>
	<p>Marque de conformité réglementaire (RCM) Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, de CEM et de spectre radio relatives aux produits fournis au marché australien ou néo-zélandais.</p>
	<p>Tenir à l'abri de l'humidité Indique un dispositif médical devant être protégé de l'humidité.</p>
	<p>Symbole de mise en garde Consultez le guide d'utilisation pour les avertissements et les mises en garde.</p>

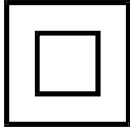	<p>Numéro de catalogue Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.</p>
	<p>Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.</p>
	<p>Double isolation Indique que l'alimentation électrique du produit est doublement isolée. Cela signifie qu'il existe un risque très faible de défauts uniques, c'est-à-dire que l'apparition de défauts uniques est évitée.</p>
	<p>Utilisation en intérieur Indique que le produit répond aux exigences d'une utilisation en intérieur.</p>

Déclaration REACH :

REACH impose à Philips Hearing Solutions de fournir des informations sur la teneur en substances chimiques pour les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) si elles sont présentes à plus de 0,1 % du poids de l'article. Le produit HearLink ne contient aucune substance figurant sur la liste REACH SVHC applicable au moment de la fabrication. Des informations plus récentes sont disponibles sur le site web www.hearingsolutions.philips.com/fr-fr/reach.

Le fabricant déclare que ce chargeur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM (2014/30/UE) et DBT (2014/35/UE).

La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

IP68



Les déchets d'équipements électroniques doivent être traités conformément aux réglementations locales.



217329/FR

< 8,15 mm >

^

Espace réservé
pour le logo
FSC

FSC
MIX
Paper

FSC® C043970

19 mm

v


< 15 mm >

^

9,0 mm

v

hearingsolutions.philips.fr

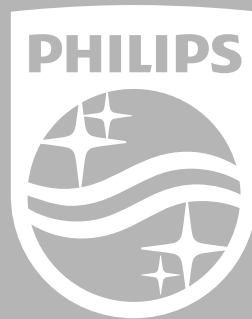

Philips et le Philips Shield Emblem sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par ou pour et est vendu sous la responsabilité de SBO Hearing A/S, et SBO Hearing A/S est le garant de ce produit.



0000217329000001

2019-12-04 | 217329 | FR