






Operating range
Betriebsreichweite
Plage de fonctionnement
Rango de funcionamiento

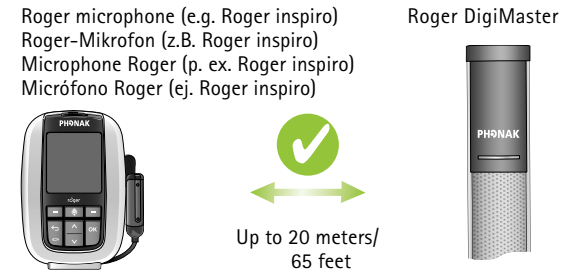


⚠ Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet
Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist
Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres
¡Fuera de alcance! Si la distancia es mayor que 20 metros

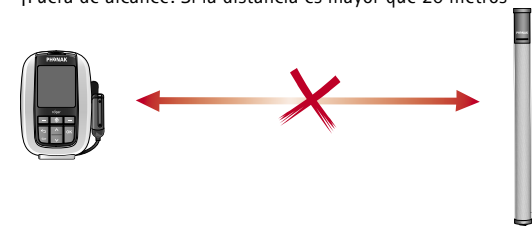

Audio connection
Audio-Anschluss
Connexion audio
Conexión de audio

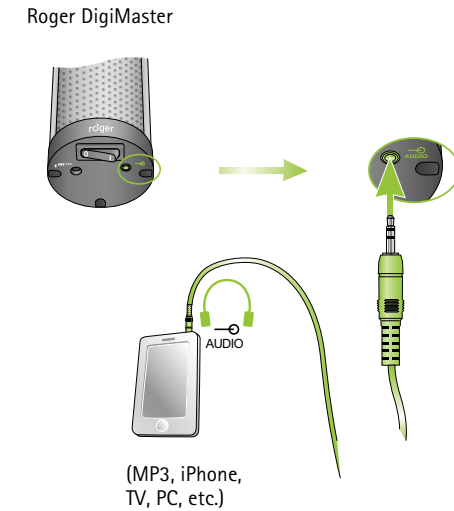

Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes

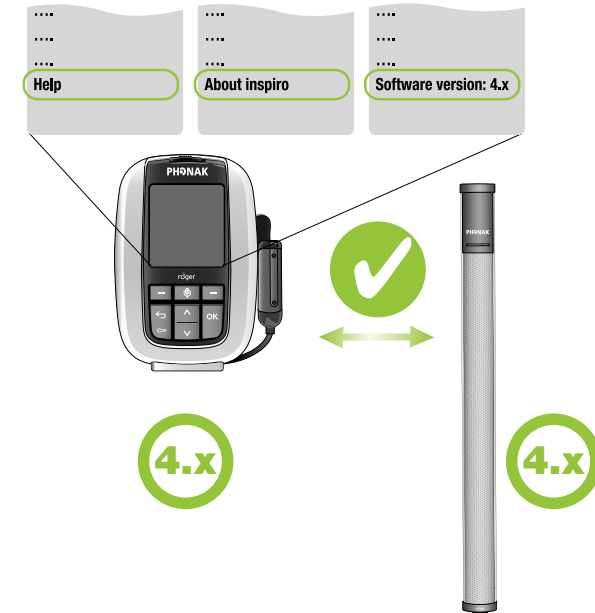

Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes

⚠ Roger DigiMaster software version 4.x is only compatible with other devices running software version 4.x or later. Use Roger inspiro to check Roger DigiMaster's firmware version.


In einem Netzwerk ist die Roger DigiMaster Software-Version 4.x nur mit anderen Geräten kompatibel, die ebenfalls über die Version 4.x verfügen. Verwenden Sie Roger inspiro um die Roger DigiMaster Software-Version zu überprüfen.

Dans un réseau, la version logiciel 4.x du Roger DigiMaster est seulement compatible avec des appareils ayant la version 4.x ou plus élevée. Utilisez Roger inspiro pour vérifier la version logiciel du Roger DigiMaster.

Dentro de una red, la versión de software 4.x de Roger DigiMaster sólo es compatible con otro dispositivo que utilice la versión de software 4.x o posteriores. Utilice Roger inspiro para comprobar la versión de software de Roger DigiMaster.



Indicator light (LED status)
Optische Anzeige (LED-Status)
Témoin lumineux (LED status)
Indicador de luminoso (LED status)

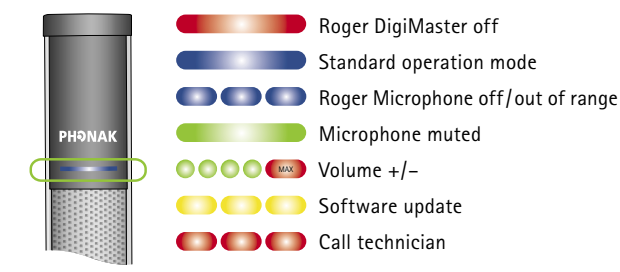

Operating conditions
Betriebsbedingungen
Conditions de fonctionnement
Condiciones de funcionamiento

+0° to +40° Celsius / +32° to +104° Fahrenheit
<95% (non condensing) relative humidity/relative Luftfeuchtigkeit/
humidité relative/ humedad relativa.

Manufacturer:
Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Switzerland

EU Representative:
Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Germany

www.phonak.com/roger

025-3163M1.00/2013-04/A+W Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved




PHONAK
life is on

Start

Components and functions
Komponenten und Funktionen
Composants et fonctions
Componentes y funciones


Roger DigiMaster

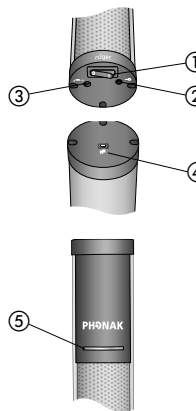

- ① On/off
- ② 3.5 mm audio input
- ③ Power socket
- ④ Mini-USB
- ⑤ Indicator light (LED)

Power supply
Stromversorgung
Alimentation
Alimentación

- ① Power supply
- ② US and EU cable

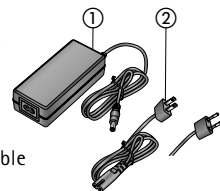


Package contents may vary slightly depending on your country
Packungsinhalt kann je nach Land variieren
Le contenu peut varier selon les pays
El contenido puede variar en función del país


Start

Components and functions
Komponenten und Funktionen
Composants et fonctions
Componentes y funciones


Option:
DigiMaster Floor stand + bag

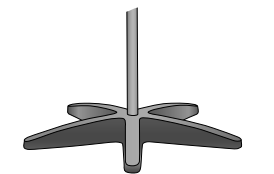

Option:
Wall mount kit

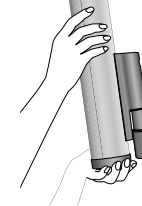


Option:
UK and AU cable

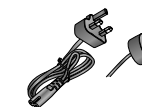


1

Mains
Stromversorgung
Alimentation
Alimentación

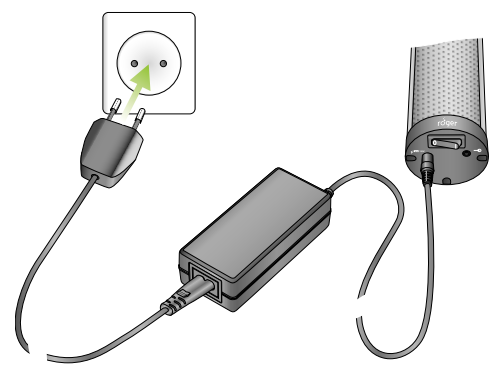


2

Switching Roger DigiMaster on
Roger DigiMaster einschalten
Enlencer Roger DigiMaster
Encender el Roger DigiMaster

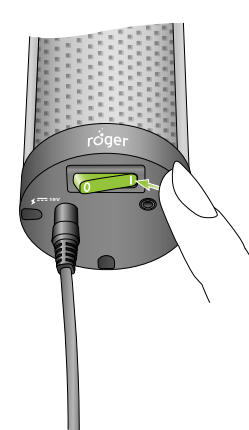

3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro
Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden
Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro
Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

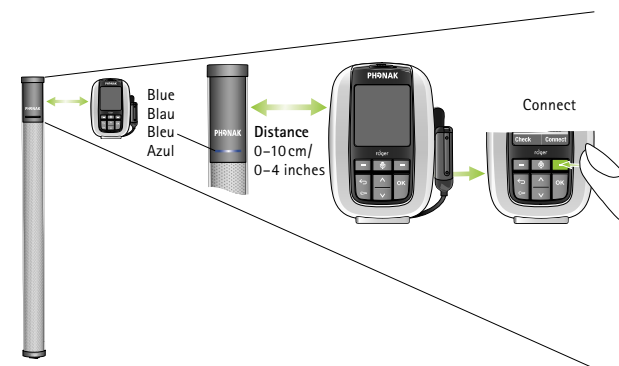

⚠ Connect Roger DigiMaster to Roger inspiro before first use (Connect).


Verbinden Sie Roger inspiro mit Roger DigiMaster vor der ersten Inbetriebnahme (Connect).

Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro avant la première utilisation (Connect).

Conecte Roger DigiMaster con Roger inspiro antes del primer uso (Connect).

3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro
Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden
Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro
Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

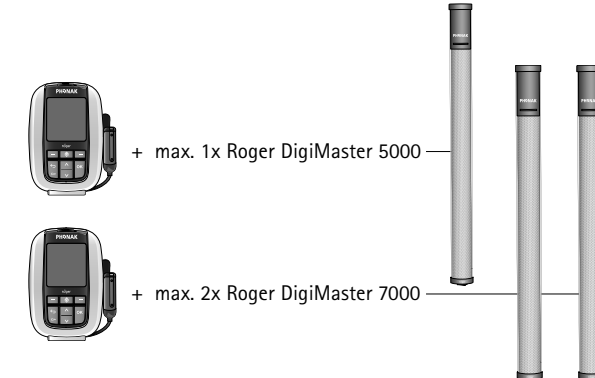

Display indicator




🔊 OK!

🔌 Switch on DigiMaster

4

How to use Roger DigiMaster
Roger DigiMaster benutzen
Comment utiliser Roger DigiMaster
Cómo utilizar Roger DigiMaster

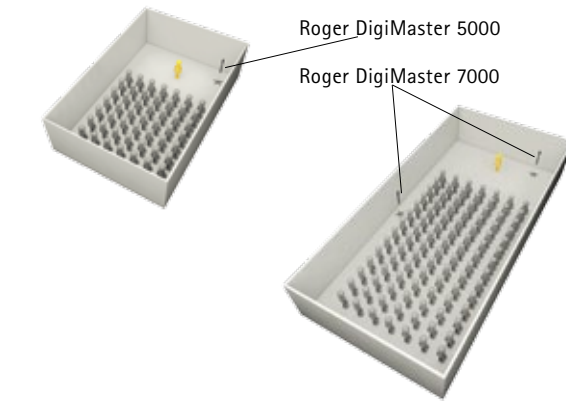

⚠ Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.

Gleiche Lautsprecherposition mit Stativ oder Wandmontage.

Même position des haut-parleurs avec le pied ou la fixation murale.

Misma posición del altavoz ya sea sobre el soporte de pie o instalado en la pared.